

Hoe maak je een achter het oor hoortoestel schoon? |Beter Horen

Uw achter-het-oor hoortoestel schoonmaken

Luchtspray, schoonmaakdoekjes, een kleine borstel, reinigings- en droog beker, en reinigingstabletten.

Verwijder het slangetje en oorstukje van uw hoortoestellen.

En maak de behuizing schoon met het borsteltje.

Om oorsmeer en ander vuil te verwijderen kunt u het slangetje en oorstukje ook schoonmaken met de schoonmaakdoekjes.

Pak dan het bekertje haal het mandje eruit en doe wat water en een reinigingstablet in het bakje.

Doe dan de slangetje en het oorstukje in het mandje en zet deze terug in de beker.

U kent deze daarna sluiten.

Wanneer uw slangetje en oorstukje schoon zijn droogt u ze af met een katoenen doekje.

Met de luchtspray maakt u ook de slangetje nog even goed schoon.

Daarna maakt u het slangetje en oorstukje weer vast.