

Schoonmaken van een in het oor (IHO-) hoortoestel | Beter Horen

Hoe uw hoortoestel te reinigen.

Om uw hoortoestel schoon te maken heeft u het volgende nodig: borsteltje, reinigingsspray, schoonmaakdoekjes, droogbeker en tabletten.

Gebruik borstel om oorsmeer te verwijderen.

Gebruik reinigingsspray op schoonmaakdoekjes en maak schoon.

Haal het mandje uit de droogbeker.

Plaats de droogtablet onder in de beker,

Plaats het mandje terug in de beker.

Leg uw uitgeschakelde hoortoestel in de beker.

Sluit de deksel en laat het 's nachts drogen.

Uw toestel is 's ochtends droog en klaar voor gebruik.

Sluit de deksel om de tablet goed te houden.

Vervang het tablet als deze zijn kleur verliest.