

Hoe maak je luidspreker in het oor hoortoestel schoon? |Beter Horen

Hoe uw hoortoestel te reinigen

Om uw hoortoestel schoon te maken heeft u het volgende nodig: reinigingsspray, schoonmaakdoekjes, borsteltje, droogbeker en tabletten.

Gebruik borstel om oorsmeer te verwijderen.

Gebruik reinigingsspray op schoonmaakdoekjes, en maak schoon.

Haal het mandje uit de droogbeker.

Plaats de droogtablet onderin de beker.

Plaats het mandje terug in de beker.

Leg uw uitgeschakelde hoortoestel in de beker.

Sluit het deksel en laat het 's nachts drogen.

Uw toestel is 's ochtends droog en klaar voor gebruik.

Sluit het deksel om de tablet goed te houden.

Vervang het tablet als deze zijn kleur verliest.