

## **De Amplifon app instellen op een Android apparaat | Beter Horen**

Amplifon App: Hoe verbinden met een Android.

Open de app.

Is het de eerste keer dat u de app gebruikt?

Druk op: Ik ben een klant.

Druk op koppel nu.

Zorg dat oudere versies van de app gesloten zijn (sluit de app eerst helemaal af door deze met uw vinger omhoog van uw scherm te vegen).

De app vraagt om toestemming – druk op toestaan.

Start uw hoortoestellen opnieuw op en druk op ik heb opnieuw opgestart.

De app begint te zoeken naar uw hoortoestellen.

Zodra de app ze heeft gevonden, druk op koppel om te verbinden.

Het koppelen van de app begint.

Accepteer het verzoek om met Bluetooth te koppelen.

Er verschijnen twee koppelverzoeken voor zowel het linker- als het rechterhoortoestel.

Druk beide keren op koppelen.

Wacht tot het verbinden compleet is en herstart indien nodig uw hoortoestellen.

Als de hoortoestellen verbonden zijn, druk op doorgaan.

De amplifon app is nu klaar voor gebruik!

Heeft u toch problemen?

1. Druk op ondersteuning
2. Ga verder neem contact met ons op