

## **De Amplifon app instellen op een iPhone | Beter Horen**

Amplifon app: Hoe verbinden met een iPhone.

Open de app.

Is het de eerste keer dat u de app gebruikt?

Druk op: Ik ben een klant.

Druk op hoortoestellen koppelen.

Druk op koppel nu.

Zorg dat oudere versies van de app gesloten zijn (sluit de app eerst helemaal af door deze met uw vinger omhoog van uw scherm te vegen).

Start uw hoortoestellen opnieuw op en druk op ik heb opnieuw opgestart.

De app begint te zoeken naar uw hoortoestellen.

Zodra de app ze heeft gevonden, druk op koppel om te verbinden.

Voor Bluetooth classic hoortoestellen:

Mocht u geen Bluetooth classic hoortoestellen hebben, geeft de app dit automatisch aan.

Volg dan dan de stappen in het volgende fragment: Made for iPhone.

Voor Bluetooth classic hoortoestellen: Er verschijnen snel twee koppelverzoeken voor zowel het linker als het rechter hoortoestel. Klik op koppel.

Made for iPhone hoortoestellen: Je moet naar de toegankelijkheidsinstellingen van je telefoon gaan om toestemming te geven.

Wacht tot uw hoortoestellen verbonden zijn.

Als de hoortoestellen verbonden zijn, druk dan op doorgaan.

De Amplifon app is nu klaar voor gebruik!

Heeft u toch problemen?

1. Druk op ondersteuning
2. Ga verder neem contact met ons op