

Een tour van de Amplifon App – ontdek alle functies | Beter Horen

Amplifon App: een rondleiding.

In deze video ontdekt u de mogelijkheden in de Amplifon App.

U ziet 4 tabbladen:

- Bediening
- Verkennen
- Mijn profiel
- Ondersteuning

(alleen beschikbaar wanneer uw hoortoestellen zijn verbonden)

Bediening:

Hier regelt u het volume.

Overzicht van uw hoortoestellen.

Programma menu.

Hoortoestellen overzicht:

Pas het actieve programma aan.

Uw hoortoestel instellingen.

Gebruiksduur.

Ontkoppel uw hoortoestel.

Verander uw actieve programma:

Hier kunt u:

- Geavanceerde instellingen aanpassen.
- Personaliseer uw naam, de kleur van de app, en het icoon van uw account.

Voor uitgebreide aanpassingen kunt u contact opnemen met uw audicien.

De instellingen kunnen per hoortoestel verschillen.

Dit kan zijn:

- Oproepbeheer
- Tap Control
- Streaming

Zie de gebruikstijd van uw hoortoestellen.

Bekijk uw gemiddelde gebruikstijd van:

- De afgelopen maand
- De laatste 6 maanden
- Het afgelopen jaar

Druk op bediening of vorige om terug te keren naar het hoofdmenu.

Hier ziet u het programma menu.

Kies een nieuw programma in het menu.

Verander de instellingen van uw huidige programma.

Voer geavanceerde veranderingen uit in uw actieve programma.

Uw programma dupliceren.

Verkennen:

Maak een afspraak.

Probeer interactieve gehoortrainingen.

Bekijk instructievideo's en lees artikelen over uw gehoorgezondheid.

Mijn profiel:

Maak een account aan voor een gepersonaliseerde ervaring.

- Bekijk je geplande afspraken
- Zie gebruikstijd van hoortoestellen

Bekijk het privacy beleid en uw toestemmingen.

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

Antwoorden op meest gestelde vragen over de app.

Bekijk de algemene voorwaarden, regelgeving, app-versie en de gebruiksaanwijzing van de app.

Zoek mijn hoortoestellen functie.

U heeft nu de volgende onderdelen verkend:

- Bediening
- Verkennen
- Mijn profiel
- Ondersteuning