

Het volume aanpassen in de Amplifon App | Beter Horen

Amplifon App: Pas het volume van uw hoortoestel aan.

Het volume verhogen.

Druk op de plus knop om het volume te verhogen zetten.

Het volume verlagen.

Druk op de min knop om het volume te verlagen zetten.

Verhoog of verlaag het volume van uw hoortoestel.

U kunt de schuifregelaar ook omhoog en omlaag slepen om het volume aan te passen.

U kunt het volume van beide kanten apart aanpassen.

Druk op de instellingen knop.

Druk op volume splitsen.

Hier ziet u het overzicht van het volume aan beide hoortoestellen.

Om de twee kanten weer samen te voegen, drukt u opnieuw op de instellingen knop.

Druk op volumes samenvoegen.

Zo simpel is het volume aanpassen!

Heeft u toch problemen?

1. Druk op ondersteuning
2. Ga verder neem contact met ons op